

### LABORATORIUM

#### SZCZEP BAKTERYJNY

- przygotować czystą, świeżą hodowlę, zawsze w dwóch wariantach:
  - płytka Petriego + podłoże transportowe, lub
  - płytka Petriego + skos,
- podać numer szczepu i datę posiewu.

Przesyłać kurierem w temp. pokojowej, zabezpieczone przed zgnieceniem.

- **hodowlę kontynuować do momentu uzyskania potwierdzenia z KOROUN o ożywieniu szczepu.**

#### Przechowywanie do momentu wysłania

- do 24 godz. w temp. pokojowej,
- do tygodnia pasażować co drugi dzień,
- powyżej tygodnia szczep zamrozić w bulionie z 15% glicerolem (można przesyłać zamrożony szczep na suchym lodzie lub świeżą hodowlę po ożywieniu, j.w.).

#### MATERIAŁ KLINICZNY DO BADAŃ MOLEKULARNYCH

##### MATERIAŁ pobrany przyżyciowo

**pobrany od pacjenta jak najszybciej, do 72 h od włączenia antybiotykoterapii**

- płyn mózgowo-rdzeniowy (200  $\mu$ l),
- krew pełna 2,5-3 ml (noworodki 0,5-1 ml), pobrana na EDTA, heparynę, cytrynian,
- surowica (2 ml).

Przesyłać kurierem w temp. pokojowej, w jałowych, szczelnie zamkniętych i dokładnie opisanych pojemnikach/probówkach (**odpowiednia wielkość do objętości próbki**).

##### Przechowywanie do momentu wysłania

- do tygodnia w lodówce,
- powyżej tygodnia zamrozić w  $-20^{\circ}\text{C}$ , najlepiej w  $-70^{\circ}\text{C}$  i wysyłać zamrożone na suchym lodzie lub z wkładem chłodzącym.

##### MATERIAŁ pobrany post mortem

**wysyłkę uzgodnić telefonicznie z KOROUN**

- krew z komór serca (2 ml),
- niewielkie skrawki (0,5x0,5x0,5 cm): śledziony, wątroby, nerek,
- fragmenty zmienionej skóry przy wysypce krwotocznej.

Przesyłać kurierem zamrożone na suchym lodzie lub z wkładem chłodzącym, w jałowych, szczelnie zamkniętych i dokładnie opisanych pojemnikach/probówkach (**odpowiednia wielkość do objętości próbki**).

##### Przechowywanie do momentu wysłania

- do 2 dni przechowywać w lodówce,
- powyżej 2 dni zamrozić w  $-20^{\circ}\text{C}$ , najlepiej w  $-70^{\circ}\text{C}$  i wysyłać zamrożone na suchym lodzie.

**UWAGA: PRZESYŁKA MUSI ZAWIERAĆ DOKŁADNIE WYPEŁNIONY FORMULARZ KOROUN**

**W przypadku braku wypełnienia formularza lub nieprawidłowo przesłanego materiału KOROUN może odmówić wykonania badania.**

Krajowy Ośrodek Referencyjny  
ds. Diagnostyki  
Bakteryjnych Zakażeń  
Ośrodkowego  
Układu Nerwowego



www.koroun.edu.pl  
Tel. 022 841 12 33

Raport badania (fax, telefon, poczta)

LABORATORIUM