

LABORATORIUM

SZCZEP BAKTERYJNY

- przygotować czystą, świeżą hodowlę, zawsze w dwóch wariantach:
 - płytka Petriego + podłoże transportowe, lub
 - płytka Petriego + skos,
- podać numer szczepu i datę posiewu.

Przesyłać kurierem w temp. pokojowej, zabezpieczone przed zgnieceniem.

- **hodowlę kontynuować do momentu uzyskania potwierdzenia z KOROUN o ożywieniu szczepu.**

Przechowywanie do momentu wysłania

- do 24 godz. w temp. pokojowej,
- do tygodnia pasażować co drugi dzień,
- powyżej tygodnia szczep zamrozić w bulionie z 15% glicerolem (można przesyłać zamrożony szczep na suchym lodzie lub świeżą hodowlę po ożywieniu, j.w.).

MATERIAŁ KLINICZNY DO BADAŃ MOLEKULARNYCH

MATERIAŁ pobrany przyżyciowo

pobrany od pacjenta jak najszybciej, do 72 h od włączenia antybiotykoterapii

- płyn mózgowo-rdzeniowy (200 μ l),
- krew pełna 2,5-3 ml (noworodki 0,5-1 ml), pobrana na EDTA, heparynę, cytrynian,
- surowica (2 ml).

Przesyłać kurierem w temp. pokojowej, w jałowych, szczelnie zamkniętych i dokładnie opisanych pojemnikach/probówkach (**odpowiednia wielkość do objętości próbki**).

Przechowywanie do momentu wysłania

- do tygodnia w lodówce,
- powyżej tygodnia zamrozić w -20°C , najlepiej w -70°C i wysyłać zamrożone na suchym lodzie lub z wkładem chłodzącym.

MATERIAŁ pobrany post mortem

wysyłkę uzgodnić telefonicznie z KOROUN

- krew z komór serca (2 ml),
- niewielkie skrawki (0,5x0,5x0,5 cm): śledziony, wątroby, nerek,
- fragmenty zmienionej skóry przy wysypce krwotocznej.

Przesyłać kurierem zamrożone na suchym lodzie lub z wkładem chłodzącym, w jałowych, szczelnie zamkniętych i dokładnie opisanych pojemnikach/probówkach (**odpowiednia wielkość do objętości próbki**).

Przechowywanie do momentu wysłania

- do 2 dni przechowywać w lodówce,
- powyżej 2 dni zamrozić w -20°C , najlepiej w -70°C i wysyłać zamrożone na suchym lodzie.

UWAGA: PRZESYŁKA MUSI ZAWIERAĆ DOKŁADNIE WYPEŁNIONY FORMULARZ KOROUN

W przypadku braku wypełnienia formularza lub nieprawidłowo przesłanego materiału KOROUN może odmówić wykonania badania.

Krajowy Ośrodek Referencyjny
ds. Diagnostyki
Bakteryjnych Zakażeń
Ośrodkowego
Układu Nerwowego



www.koroun.edu.pl
Tel. 022 841 12 33

Raport badania (fax, telefon, poczta)

LABORATORIUM